



移动肺保

远大空气产品 肺保系列

PM2.5过滤效率 $\geq 99.9\%$ ^①

细菌过滤效率(BFE) $\geq 99.39\%$ ^②

病毒去除率 $\geq 99.5\%$ ^③

运动出行与工作，安全防护全天候
正压送风氧气足，清新呼吸无忧虑

型号：FB2

- ①检测机构：广东省微生物分析检测中心 2017FM00651R01
检测依据：GB/T18801-2015《空气净化器》附录H
检测对象：颗粒物
- ②检测机构：广州市微生物研究所 KJ20200111
检测依据：YY0469-2011 医用外科口罩
检测对象：附录B要求的试验用细菌
- ③检测机构：中科检测技术服务(广州)股份有限公司 JKK25050052
检测依据：GB/T18801-2022《空气净化器》附录H
检测对象：毒株-噬菌体MS2、宿主菌-大肠杆菌



医院
医生
护士
呼吸病人



运动
跑步
骑车
健身




雾霾天
室外
室内
车内




施工
电焊
矿井
装修

■ 结构图

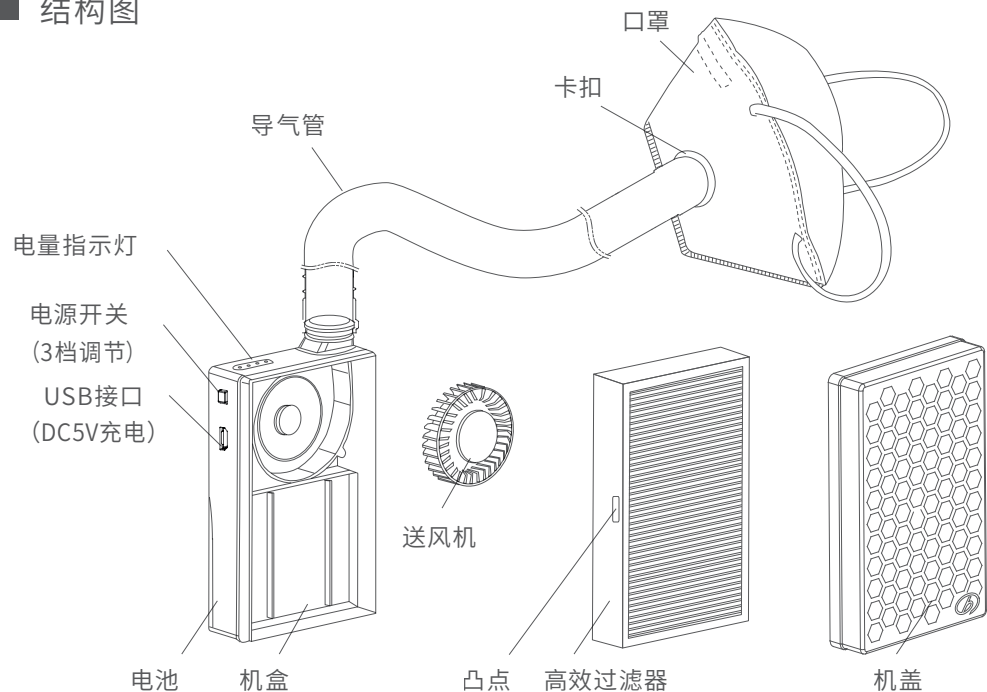

■ 产品配件

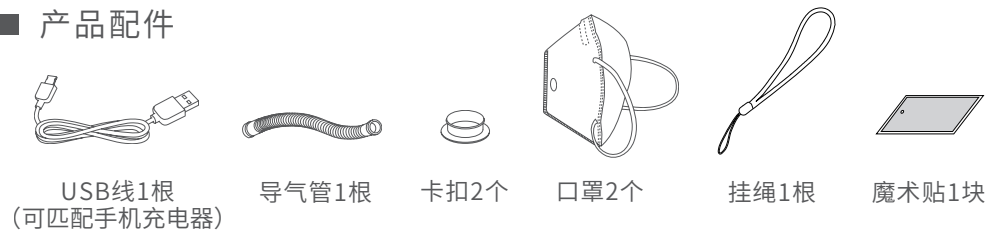

■ 异常情况处理

No.	现象	原因	处理方法
1	风量不足	过滤器堵塞	更换高效过滤器
2	风机不转	风机或电路板坏, 电池没电, 未抽掉电池隔绝薄膜	维修或更换, 充电, 抽掉电池隔绝薄膜
3	充不进电	电路板或USB线坏或适配器坏	维修或更换
4	过滤器装不进	装反了	凸点向上
5	气管漏气	导气管老化或损坏	更换

■ 参数表

项目	1档	2档	3档
风量 m ³ /h	2	3	4
功率 W	0.6	1.2	1.8
噪声 dB(A)	40~47		
电源	锂电池3.7V/7.4Wh (符合民航安检≤100Wh, 可上飞机)		

■ 安装步骤

- 用卡扣把口罩与导气管连接
- 将导气管另一端与主机连接
- 首次开机前请打开电池盖取出隔绝膜
- 长按电源开关2秒开机

■ 风量调节

- 日常开1、2档
- 劳动时、运动时用3档
- 首次使用建议, 运行1~2小时吹净胶料气味再戴

■ 口罩更换

- 准备个新的口罩, 选择在靠近鼻孔的左侧或右侧, 画一个 $\Phi 12\sim 14\text{mm}$ 圆
- 圆对折, 用剪刀剪孔
- 装上卡扣和气管即可

■ 常规佩戴方法

- 戴上挂绳, 将机器吊挂于胸前, 戴上已接气管的口罩
- 在室外温度较低时主机应放在口袋内或者挂在胸前, 以减少冷空气带来的不适感
- 亦可以将魔术贴上的挂绳取下, 将魔术贴粘于安全帽上, 便于作业
- 导气管为易损件, 使用过程中请勿过度拉扯, 避免指甲等锐利物划伤, 以免漏气

■ 过滤器更换 (停机断电后再操作)

- 当风量低于新过滤器70%, 需更换过滤器
- 更换高效过滤器: 打开机盖, 从机器内取下高效过滤器进行更换, 累计运行约1个月更换, 具体视污染情况而定。安装高效过滤器时, 凸点必须向上, 否则过滤器装不进
- 口罩脏了就需清洗或更换

■ 保修

- 交付之日起, 免费保修1年。因产品设计、制造原因造成的故障, 或由于厂方运输造成的损失, 可免费维修或更换配件
- 注意: 机身贴有编号, 也可作为保修依据, 撕毁无效

■ 保养

- 用户自行保养, 保养内容: 更换高效过滤器
- 停机时不佩戴, 避免机内吸入水汽
- 机身不可接触液体, 避免雨天暴露使用
- 机身不可受到强烈冲击

合格证 / 质保卡

产品名称: 移动肺保

产品型号: FB2

产品批次:

检验员:

购买日期:

出售店铺:

销售员:

